

WIDEX BEYOND YHDISTÄMISOPAS ANDROID-PUHELIMIIN


TARKISTA OHJELMISTOVERSIO

Jotta Android-puhelimesi olisi yhteensopiva Beyond-sovelluksen ja Beyond-kuulokojeiden kanssa, sen tulee olla **versio 6.0.1 tai uudempi**.
Voit tarkistaa sen seuraavalla tavalla helposti.


1. Mene kohtaan 'Asetukset'




2. Paina valikosta 'Tietoja laitteesta' *

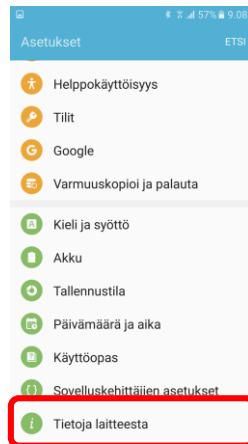


3. Paina valikosta 'Ohjelmistotiedot'

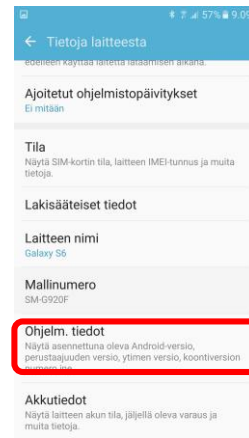

4. Tarkista luku kohdan 'Android-versio' alta. Sen tulee olla **6.0.1 tai suurempi**.

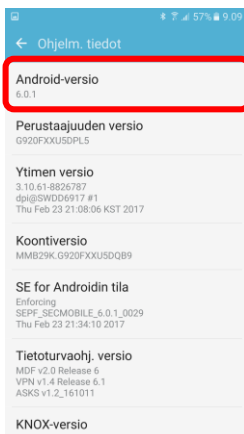

* **VIHJE!** 'Tietoja puhelimesta'-valikosta voit ottaa käyttöön toiminnon 'Lataa päivitys automaattisesti', jolloin varmistat, että sinulla on aina uusin ohjelmistoversio.

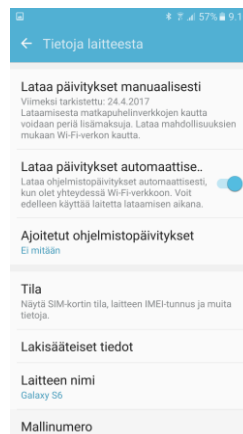

WIDEX BEYOND YHDISTÄMISOPAS ANDROID-PUHELIMIIN


BEYOND-KUULOKOJEIDEN YHDISTÄMINEN BLUETOOTHIN KAUTTA

Ennen kuin voit aloittaa Beyond-sovelluksen käytön, sinun täytyy yhdistää/pariliittää kuulokojeesi puhelimeen Bluetoothin kautta.


1. Mene 'Asetuksiin'



2. Valitse 'Bluetooth'


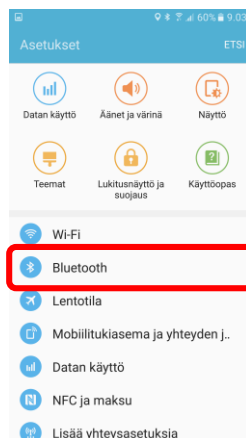


3. Varmista, että Bluetooth on käytössä

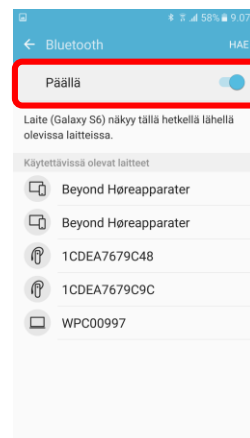

4. Kohdassa 'Käytettävissä olevat laitteet' sinun pitäisi nyt nähdä O+V Beyond-kuulokoje. Voidaksesi yhdistää/pariliittää paina sekä O että V -kojetta.

5. Kun puhelin ja kuulokojeet on pariliitetty, sekä O+V näkyvät kohdassa 'Pariliitetyt laitteet'.

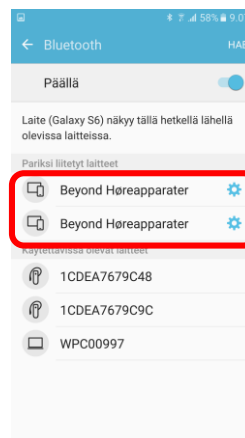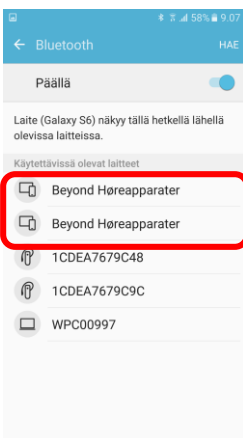


WIDEX BEYOND YHDISTÄMISOPAS ANDROID-PUHELIMIIN


BEYOND-SOVELLUKSEN KÄYTÖN ALOITUS

Kun ohjelmisto on päivitetty ja Beyond-kuulokojeet yhdistetty puhelimeen, voit aloittaa Beyond-sovelluksen käytön.

1. Valitse 'Beyond'-kuvake

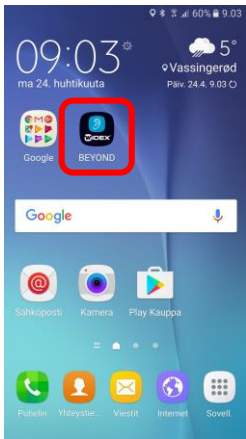

2. Sovellus etsii automaattisesti kuulokojeesi.

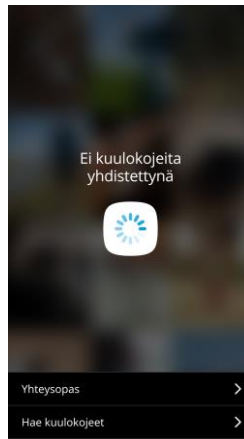

3. Kun sovellus on rekisteröinyt kuulokojeesi, voit aloittaa sovelluksen käytön.

