


# WIDEX BEYOND YHDISTÄMISOPAS iPhoneen

## TARKISTA OHJELMISTOVERSIO


Jotta iPhone olisi yhteensopiva Beyond-sovelluksen ja Beyond-kuulokojeiden kanssa sen tulee olla versio numero **iOS 10.0 tai uudempi**.

Voit tarkistaa sen helposti alla olevalla tavalla.


### 1. Avaa 'Asetukset'

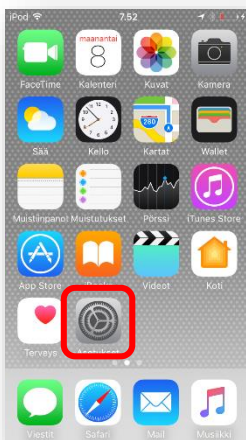

### 2. Valitse valikosta 'Yleiset'

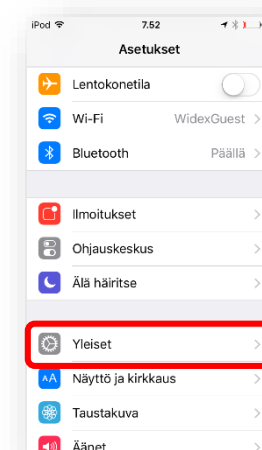


### 3. Valitse valikosta 'Tietoja'

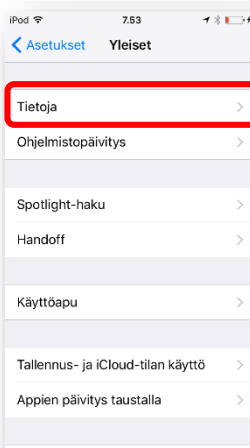

### 4. Tarkista luku kohdasta 'Versio'

Sen tulee olla **iOS 10.0 tai uudempi**.

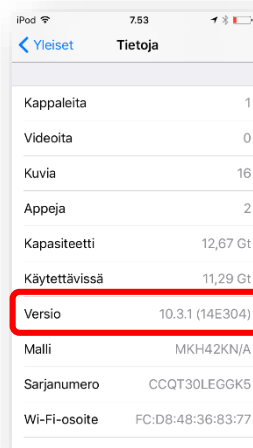

# WIDEX BEYOND YHDISTÄMISOPAS iPhoneen


## YHDISTÄ BEYOND-KUULOKOJEESI BLUETOOTHILLA

Ennen kuin voit aloittaa Beyond-sovelluksen käytön sinun täytyy yhdistää/pariliittää kuulokojeesi puhelimeen Bluetoothin kautta.


### 1. Avaa 'Asetukset'



### 2. Varmista, että Bluetooth on päällä

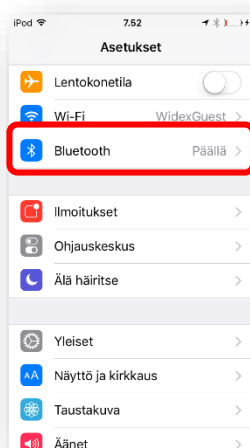


### 3. Valitse valikosta 'Yleiset'

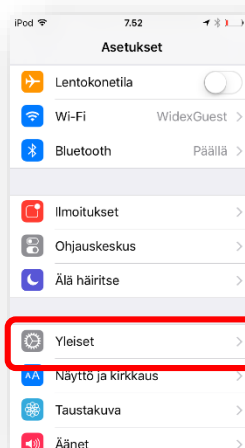


### 4. Valitse 'Käyttöapu'




### 5. Valitse valikosta 'Kuulokojeet'

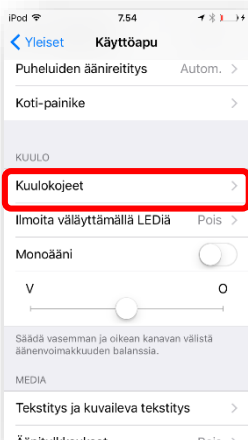


### 6. Kohdassa 'Laitteet' pitäisi nyt näkyä O+V Beyond-koje. Yhdistä/pariliitä painamalla kenttää.

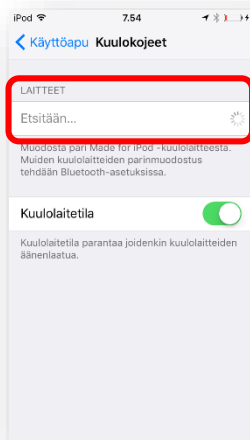

### 7. Saat pyynnön muodostaa pari. **HUOMAA, että tämän pitää tapahtua 2 kertaa,** 1 kerta/koje

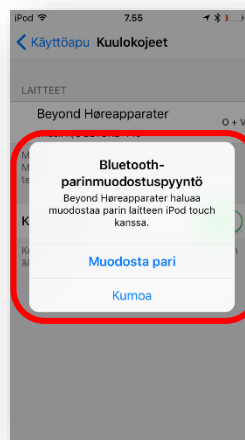

### 8. Yhdistymisen onnistuttua näet O+V -kojeet valikossa.

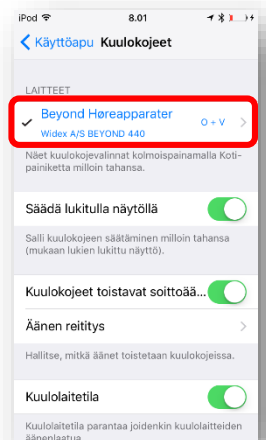


# WIDEX BEYOND YHDISTÄMISOPAS iPhoneen


## BEYOND-SOVELLUKSEN KÄYTÖN ALOITUS

Kun ohjelmisto on päivitetty ja Beyond-kuulokojeet pariliitetty puhelimen kanssa, voit alkaa käyttää Beyond-sovellusta.

### 1. Avaa 'Beyond'-sovellus

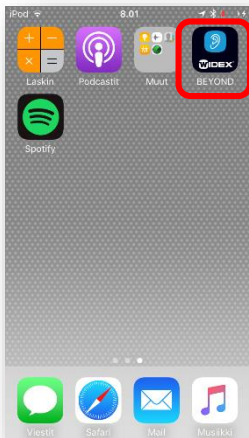

### 2. Sovellus alkaa automaattisesti etsiä kuulokojeitasi

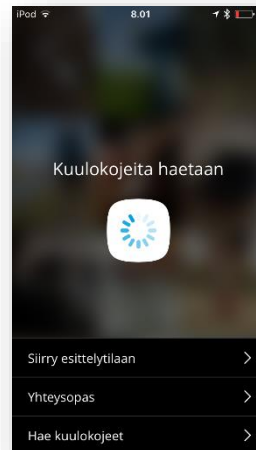

### 3. Kun sovellus on rekisteröinyt kuulokojeesi, voit alkaa käyttää sovellusta.

